


빠른 참조 가이드

보관 및 취급 요건

- + 실온화하거나 액체 상태로 준비하지 않아도 됩니다—냉장고에서 꺼낸 후 바로 실행하십시오.
- + 냉장고에 보관합니다. 냉동하지 마십시오.
- + 개봉하지 않은 채로 실온에서 최대 8시간까지 최대 5회 보관할 수 있습니다. 8시간 후 미사용 및 미개봉한 재료는 냉장고에 보관합니다.
- + 실수로 냉동한 경우:
 - + 8시간 미만 냉동한 경우, 실온에서 최소 60분간 해동한 후 사용하십시오.
 - + 8시간이 지난 경우, 폐기하십시오.

Catalyst SmartQC는 간단합니다 — 장비에 장착하고 바로 실행하면 됩니다.

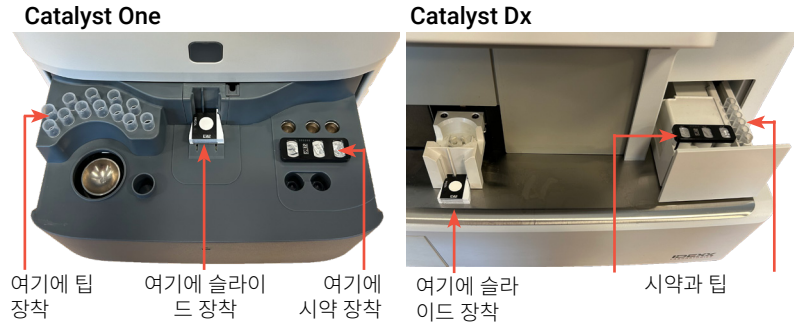

자주 묻는 질문

질문	답변
Catalyst SmartQC Control이란?	Catalyst SmartQC Control은 Catalyst One* 화학 분석기 또는 Catalyst Dx* 화학 분석기가 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 정도 관리 물질(Catalyst CLIP 및 시약 팩)입니다.
Catalyst SmartQC는 언제 사용하나요?	Catalyst SmartQC는 매월 분석기 내부 구성품을 세척한 후, 분석기 설치 시, 또는 분석기를 옮길 때마다 실행해야 합니다.
Catalyst SmartQC를 어떻게 실행하나요?	1. Catalyst 화학 분석기의 내부 구성품을 세척합니다. 2. Catalyst One의 경우: IDEXX VetLab* Station 홈 화면에서 Catalyst One 분석기 아이콘을 누른 다음, 유지 > 정도관리 > SmartQC 실행을 누릅니다. 또는 Catalyst Dx의 경우: IDEXX VetLab Station 홈 화면에서 Catalyst Dx 아이콘을 누른 다음 정도관리 > SmartQC 실행을 누릅니다. 3. Catalyst One의 IDEXX VetLab Station 화면 또는 Catalyst Dx 화학 분석기 터치 스크린의 화면 지침에 따라 SmartQC 물질을 분석기에 장착하고 실행을 완료합니다.
Catalyst SmartQC는 환자 검체 또는 다른 Catalyst CLIP/슬라이드와 함께 실행할 수 있나요?	실행 불가능합니다. 정도관리 실행시 피펫 팁과 Catalyst SmartQC CLIP 및 시약만 장착해야 합니다. 검체 컵, 전혈 분리기, 또는 기타 CLIP/슬라이드(예전엔 월간 QC에 필요했던 Catalyst* Lyte 4 CLIP 포함)는 장착하지 마십시오 .
Catalyst SmartQC의 검사 소요 시간은 어떻게 되나요?	Catalyst SmartQC 결과는 검사를 시작한 후 약 15분 내로 제공됩니다.
Catalyst SmartQC는 결과를 제공하나요?	예, 제공합니다. Catalyst SmartQC를 실행하면 “통과” 또는 “범위 초과” 결과가 제공됩니다. + 통과 결과는 분석기가 최적으로 작동하고 있음을 나타내며, 필요에 따라 분석기를 바로 사용할 수 있습니다. + 범위 초과 결과는 실행 중에 문제가 감지되었음을 나타냅니다. “범위 초과” 결과로 표시되는 경우, 새 Catalyst SmartQC 슬라이드와 시약으로 다시 실행하십시오. 두 번째 실행 결과 또한 “범위 초과”로 나온 경우, IDEXX 학술지원센터에 문의하여 도움을 받으십시오.
분석기에서 Catalyst SmartQC 실행 시기에 대한 알림을 받으려면 어떻게 해야 하나요?	1. Catalyst One의 경우: IDEXX VetLab* Station 홈 화면에서 Catalyst One 분석기 아이콘을 누른 다음 유지 > 정도관리를 누릅니다. 또는 Catalyst Dx의 경우: IDEXX VetLab Station 홈 화면에서 Catalyst Dx 분석기 아이콘을 누른 다음 정도 관리를 누릅니다. 2. 화면 왼쪽에서 드롭다운 목록을 사용하여 반복 알림 메시지를 받고 싶은 시점을 선택합니다.