


빠른 참조 가이드

참고: Catalyst One* 화학 분석기 사용에 대한 자세한 지침은 *IDEXX Catalyst One* 화학 분석기 사용자 가이드*를 참조하십시오.

Catalyst One* 분석기 구성품

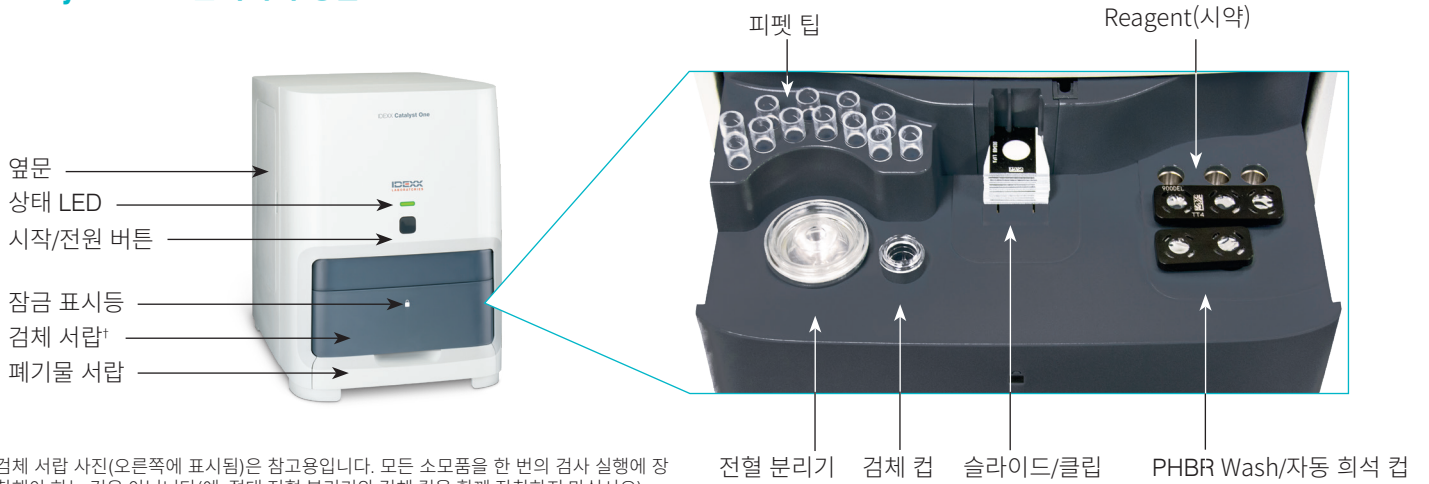

*검체 서랍 사진(오른쪽에 표시됨)은 참고용입니다. 모든 소모품을 한 번의 검사 실행에 장착해야 하는 것은 아닙니다(예: 절대 전혈 분리기와 검체 컵을 함께 장착하지 마십시오).

검체량



*Chem 17 클립과 전해질을 함께 검사할 때 권장되는 검체량은 300 µL입니다.

검사 방법

1. IDEXX VetLab* Station에 환자 정보를 입력합니다.
2. 검체 서랍에 슬라이드와 검체를 장착합니다.
3. 검체 서랍을 닫고 분석기의 시작 버튼을 누릅니다.

희석

Catalyst One 분석기는 자동 희석(분석기가 검체와 희석액을 자동으로 혼합)과 수동 희석(사용자가 분석기 밖에서 수동으로 희석)을 지원합니다. **암모니아, 페노바르비탈, 프럭토사민, total T₄, SDMA, 프로게스테론, 담즙산 또는 전해질 검사에서는 검체를 희석하지 마십시오.**

정도 관리 실행

1. IDEXX VetLab Station 홈 화면에서 **Catalyst One** 아이콘을 누릅니다.
2. **Maintenance**(유지)를 선택한 다음 **Quality Control**(정도 관리)을 누릅니다.
3. 사용하고 있는 정도 관리 로트 번호를 선택한 다음 **Run QC**(QC 실행)를 누릅니다.
4. 화면의 지시에 따라 정도 관리를 준비하고 실행하세요.

장비 내부 세척(매월)

1. IDEXX VetLab Station 홈 화면에서 **Catalyst One** 아이콘을 누릅니다.
2. **Maintenance**(유지)를 누르고, **Clean**(세척)을 선택한 다음, 화면의 지시에 따릅니다.
 - a. 분석기의 옆문을 엽니다.
 - b. 녹색 레버가 분석기 내부 자석에 붙을 때까지 캐러셀 덮개를 올립니다.
 - c. 캐러셀을 꺼냅니다.
 - d. IDEXX에서 제공한 알코올 패드를 사용하여 인큐베이터 링과 광학 윈도우(렌즈)를 닦습니다.
 - e. 캐러셀의 하얀색 참조 타일을 닦습니다.
 - f. 마른 광학용 티슈를 사용하여 광학 윈도우와 흰색 참조 타일을 건조시킵니다.
 - g. 캐러셀을 재장착하고, 찰칵 소리를 내면서 제자리에 들어갈 때까지 캐러셀 덮개를 내리고, 옆문을 닫습니다.
 - h. **Done**(완료)을 누릅니다.

