

Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 검사

빠른 참조 가이드

보관 및 취급 요건

- 냉동고 문에 보관하지 말고 냉동고에 보관하십시오.
- 실온화 하지 않아도 됩니다. 냉동고에서 꺼내 바로 검사를 실행합니다.
- Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트는 실온에서 최대 8시간 보관할 수 있습니다. 8시간이 지나면 냉동고에 보관하십시오. 권장하는 검체 양:
 - 전혈: 600~800µL
 - 혈청/혈장: 100µL (최소 65µL, 다른 슬라이드와 함께 검사를 실행하는 경우 300µL)

장착하고 실행!

Catalyst One* 화학 분석기



Catalyst Dx* 화학 분석기



자주 묻는 질문

질문	답변
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트에서 검사 가능한 검체 유형은 무엇입니까?	적합한 검체 유형은 혈청, 리튬 헤파린 혈장, Catalyst* 리튬 헤파린 전혈 분리기를 사용한 전혈 등이 있습니다.
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트에 대해 어떤 종이 검증되었으며 측정 가능 범위는 어떻게 됩니까?	Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트에서 지원되는 종은 canine과 feline입니다. 수치 결과는 canine에 대해 30~2,000 U/L가 보고되며 feline에 대해 0.5~50.0 U/L가 보고됩니다.
다른 슬라이드와 함께 Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트를 실행할 수 있습니까?	예! 이 테스트는 단독으로도 검사 가능하며, 종합적인 환자 프로파일을 위해 다른 슬라이드와 함께 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 환자 검체로 Catalyst* Lyte 4 CLIP, Catalyst* Chem 17 CLIP, Catalyst* SDMA, 그리고 Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 검사를 같이 실행할 수 있습니다.
다른 슬라이드와 함께 검사를 실행할 때, Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 슬라이드를 특정 순서로 장착해야 합니까?	• Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 슬라이드는 전해질(Lyte4) 이후 순서 상관없이 장착해도 됩니다. • 전해질(Lyte4) 슬라이드와 함께 Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 검사를 실행하는 경우, 항상 전해질(Lyte4) 슬라이드를 먼저 장착해 주십시오. • 결과를 가장 빨리 받아보기 위해 권장되는 장착 순서는 하단에 전해질(Lyte4) CLIP을 장착한 다음, chemistry CLIP (예: Chem 17, Chem 15 등), Catalyst* Pancreatic Lipase(PL), 그리고 기타 슬라이드를 장착하고 그 위에 TT₄를 장착하는 것입니다. • 매번 검사 실행 전에 검체서랍에 반드시 피펫 팁을 장착하십시오. (1회 검사 시 사용 가능한 최대 슬라이드 수는 25개입니다.)
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트의 실행 시간은 얼마나 됩니까?	Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 결과는 검사를 시작한 후 약 9분 뒤에 제공됩니다.
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트를 받는 검체를 회식해도 됩니까?	IDEXX는 Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트 실행 시 회식 검체의 사용을 지원하지 않습니다.
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 슬라이드를 실온에 두었다가 냉동고에 다시 넣을 수 있는 횟수는 몇 번까지입니까?	실온에 놓아둔 Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트는 개봉하지 않은 경우 최대 5번 냉동고에 다시 넣을 수 있습니다.
Catalyst* Pancreatic Lipase(PL) 테스트를 실수로 냉장 보관한 경우 어떻게 합니까?	냉장 보관된 것으로 의심되는 모든 슬라이드는 폐기해야 합니다.