

# IDEXX VetLab\* UA\* 요분석기

## 빠른 참조 가이드

### IDEXX UA\* 스트립 판독


원심분리하지 않은 신선한 소변을 사용합니다. 소변 검체를 철저히 혼합합니다. 검사를 수행할 때 검체는 실온에 있어야 하며, 1시간 이상 그대로 방치되면 안 됩니다.

자세한 지침은 IDEXX VetLab\* UA\* 요분석기 사용자 가이드를 참조하십시오.



- 1 피펫을 사용하여 UA 스트립에 소변 검체를 적셔줍니다. 검사 패드가 완전히 적셔지도록 합니다. 스트립을 구부리지 마십시오.

**중요:** IDEXX VetLab UA 요분석기에는 오직 IDEXX UA 스트립만 사용할 수 있습니다. 다른 브랜드의 스트립을 사용하지 마십시오.

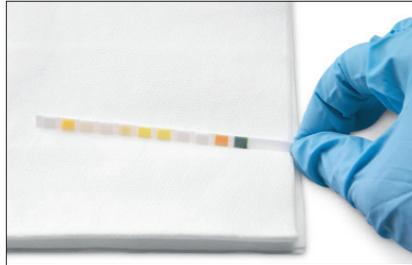

- 2 검사 스트립을 사진과 같이 가장자리와 뒷면을 차례로 흡수제 (예: 종이 티슈) 에 부드럽게(약 1초) 닦습니다.



- 3 검사 패드가 위를 향하도록 하여 스트립 트레이에 검사 스트립을 놓습니다. 앞쪽 가장자리가 삽입 슬롯의 클립에 고정되도록 합니다. 고정 막대는 열려 있어야 합니다. 스트립 끝 부분의 약 2mm 정도가 클립 아래에 고정되어야 합니다.



- 4 시작 버튼을 누릅니다. 경고음이 울립니다. 트레이가 약간 앞으로 이동하며 고정 막대가 닫힙니다.

검사 스트립 트레이가 자동으로 검사 스트립을 분석기 안쪽으로 삽입한 후, 판독이 완료되면 시작 위치로 되돌아갑니다. 분석기가 측정 준비 모드로 돌아갈 때까지 검사 스트립을 제거하지 마십시오. 시작 버튼을 누른 후 모든 측정이 완료될 때까지 약 80 초가 걸립니다.



- 5 결과를 인쇄한 후 검사 스트립을 제거 및 폐기합니다. 트레이에 소변이 묻은 경우 보풀이 없는 천으로 닦아냅니다.

**참고:** UA 요분석기가 IDEXX VetLab Station에 연결되어 있는 경우, 검사 결과가 자동으로 전송됩니다.

### IDEXX 기술 지원

한국 080 7979 133