




SNAP Pro 분석기

SNAP Pro* 분석기는 반려동물의 검사를 위한 자동화 장비로, 검사 결과를 환자의 전자 의료기록으로 전송함으로써 시간과 비용을 절약합니다. SNAP Pro를 도입함으로써 자동화의 이점을 얻을 수 있었으나, SNAP* 검사 결과는 여전히 수동으로 입력해야 했습니다. SNAP Pro* 분석기의 새로운 ProRead* 기능으로 SNAP 검사 결과가 자동으로 판독되므로 SNAP 검사 작업 단계가 줄어, SNAP Pro가 더욱 가치를 발하게 됩니다.

ProRead 결과 보기

선호하는 작업방법을 이용하여 SNAP 검사를 실행하십시오. 분석이 완료되면, ProRead 기능을 사용하지 않았을 때와 비슷한 결과 화면이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 다만, 이제부터는 결과가 자동으로 제공되므로 결과 창을 읽고 양성 또는 음성에 해당하는 결과를 하나씩 입력할 필요가 없다는 점이 다릅니다.

자동으로 제공되는 결과 외에도, 분석기의 상태 등 색상이 결과에 따라 달라집니다. 상태 등의 색상은 다음과 같은 의미입니다.

- **녹색**: 모든 결과가 음성.
- **파란색**: 최소 1건이 양성.
- **노란색**: 결과 창에 표시된 매우 밝은 반점 혹은 예상하지 못한 색상 변화(예: 잔해 또는 푸른 색조)로 인해 검사 결과를 확인해야 할 수 있음. 표시된 결과에 동의하는 경우, **체크 표시** 아이콘  을 눌러 검사 결과를 저장합니다. 혹은, 적절한 결과 아이콘을 누른 후 **체크 표시** 아이콘을 누릅니다 . 검사를 취소하고 메인 화면으로 돌아가려면 닫기 아이콘  을 누르십시오.



녹색 상태 = 모든 결과가 음성

파란색 상태 = 최소 1건이 양성

노란색 상태 = 실행을 완료하려면 사용자 입력 필요.



도움이 필요하신가요?
설치 영상 및 지원
문서를 보시려면
idexx.com/prohelp
에 방문해 주십시오.